

CERTIFICATO DI GARANZIA

Se il prodotto risulta non funzionante può essere restituito, entro una settimana dall'acquisto, al rivenditore, che provvederà alla sostituzione. Oltre tale periodo si dovrà contattare il centro assistenza tramite mail: assistenza@miobebee.it

In tutti i casi il prodotto dovrà essere consegnato nella confezione originale, integra e completa di tutti gli accessori inclusi.

Non tentare di modificare o riparare personalmente il prodotto.

La garanzia non copre i danni derivati da un uso del prodotto diverso da quello previsto e decorre dalla data indicata sullo scontrino fiscale che dovrà essere conservato ed ha la validità di due anni.

ATTENZIONE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non utilizzare il prodotto nel caso in cui abbia subito cadute, urti o danni. Se il prodotto è sporco, bagnare un panno in acqua leggermente saponata, strizzarlo, quindi pulire la superficie del prodotto. Non utilizzare benzina o solventi.


miobebee
infanzia più semplice

MANUALE UTENTE
leggere attentamente prima dell'uso



RISPETTA
L'AMBIENTE



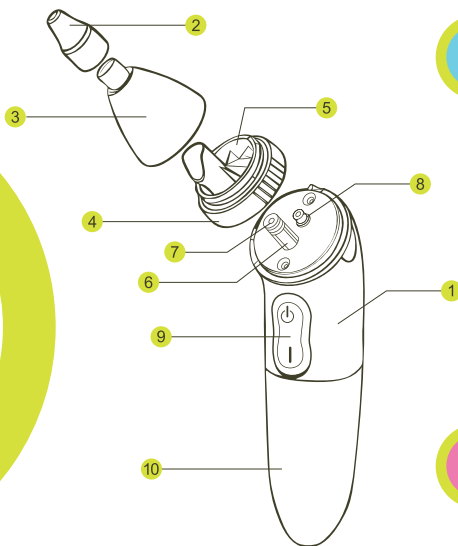

Distribuito da:
New.Fa.Dem. Srl
Zona Ind. ASI
Via Ferrovia dello Stato, 1
80014 Giugliano in Campania
(Na) Italy

www.miobebee.it
info@miobebee.it





- 1. Corpo
- 2. Beccuccio in silicone
- 3. Coperchio
- 4. Sottocoperchio
- 5. Serbatoio secrezioni
- 6. Foro di ventilazione
- 7. Foro di aspirazione
- 8. Foro d'uscita
- 9. Interruttore ON/OFF
- 10. Coperchio vano batterie



SOSTITUZIONE BATTERIE

- Rimuovere il coperchio del vano batterie
- Inserire 2 batterie AA rispettando la polarità +/-
- Riposizionare il coperchio del vano batterie

NB: Nel caso di mancato utilizzo dell'apparecchio per un tempo prolungato, rimuovere le batterie, per evitare dispersioni e possibili danni all'aspiratore nasale.

Estrarre subito le batterie quando sono scariche. Non gettarle tra i normali rifiuti, ma riporle negli appositi contenitori per la raccolta delle pile usate.

RICAMBI

- Beccuccio per secrezioni abbondanti
- Beccuccio per media secrezione
- Beccuccio per bambini dai 0 ai 3 mesi
- Guarnizione



A

RIMOZIONE E PULIZIA DEL SERBATOIO SECREZIONI

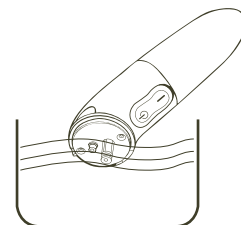
- Rimuovere il beccuccio in silicone (2)
- Tirare verso l'alto il sottocoperchio (4) per sganciarlo dal corpo (1)
- Svitare il coperchio (3) in senso antiorario e separarlo dal sottocoperchio (4)
- Risciacquare con acqua: beccuccio (2), coperchio (3) e sottocoperchio (4)
- Sterilizzare i tre componenti immergendoli in acqua bollente o utilizzando uno sterilizzatore (a vapore o a microonde)



B

PULIZIA DELL'ASPIRATORE NASALE

- Assicurarsi che il vano batterie sia chiuso.
- Immergere il foro di aspirazione (7) in acqua
- Accendere l'apparecchio per pochi secondi
- NB: NON IMMERGERE L'INTERRUTTORE



C

RIASSEMBLAGGIO DELL'ASPIRATORE

- Assicurarsi che la guarnizione in silicone del serbatoio (5) sia nella posizione corretta
- Riavvitare e riassemblare i pezzi

AVVERTENZE

- Per un migliore utilizzo si consiglia di tenere il bebè in posizione seduta e di otturare temporaneamente la narice libera
- Per agevolare l'aspirazione del muco si consiglia di utilizzare una soluzione salina
- Non utilizzare l'aspiratore in caso di irritazione nasale
- Prima dell'uso si raccomanda di pulire l'apparecchio
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore
- MioBeebe aiuta a prevenire le difficoltà respiratorie dovute all'accumulo di muco. Non utilizzarlo per scopi diversi da quello previsto.